

## Rescue krem za tretman sve 4 faze herpesa na usnama



SoreFix Rescue, krem za tretman herpesa na usnama predstavlja jedinstveno rešenje sa dokazanim delovanjem na sve 4 faze herpesa na usnama. SoreFix Rescue krem za tretman herpesa na usnama formira zaštitnu vlažeću barijeru koja hidrira i štiti usne od faktora spoljašnje sredine. Ublažava peckanje (svrab), smanjuje stvaranje plikova, skraćuje vreme zarastanja i sprečava pucanje krate (videti sliku "Delovanje na sve faze"). SoreFix Rescue je providni krem koji ne naglašava vidljivost herpesa na usnama i sadrži faktor zaštite od sunca (SPF 30).

### Doziranje i način upotrebe:

Za optimalne rezultate tokom tretmana, naneti krem 3-6 puta dnevno na obolelo područje na usnama da biste sprečili širenje herpesa. SoreFix Rescue se može bezbedno koristiti tokom celokupnog trajanja herpesa, od početne faze peckanja do trenutka kada krate otpadne i herpes u potpunosti zaraste. Savetujemo da uvek operete ruke pre i nakon nanošenja krema da biste sprečili kontaminaciju. Ukoliko koristite ruž za usne, nanosite SoreFix Rescue najmanje 15 minuta pre nanošenja ruža.

Krem ne sadrži sulfate, polietilenglikole, TEA, DEA, parabene i druge konzervanse.

Ukoliko se desi ozbiljan incident povezan sa primenom ovog proizvoda, prijavite ga ovlašćenom predstavniku proizvođača navedenom u uputstvu ili nadležnom organu za medicinska sredstva u Vašoj zemlji.

### KAKO SOREFIX DELUJE U SVAKOJ FAZI HERPESA NA USNAMA


**0** Neaktivan virus herpesa na usnama  
Blokira aktivatore herpesa i poboljšava stanje usana

**1** Faza 1: Peckanje  
Ublažava peckanje

**2** Faza 2: Stvaranje plikova  
Smanjuje stvaranje plikova

**3** Faza 3: Čir  
Skraćuje vreme zarastanja

**4** Faza 4: Zarastanje  
Sprečava pucanje krate

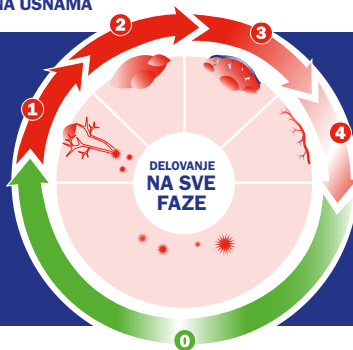

### AKTIVATORI HERPESA NA USNAMA:

Infekcija

Sunčeva svetlost / UV zračenje

Stres

Hormonske promene

Slabost

Povreda usne

Ekstremna hladnoća

Oslabljen imunitet

### Sastav:

izostearilizostearat (46%), ulje jojobe (12%), hidrogenizovani stiren/ izopren kopolimer, etilheksilmetoksicinamat (8%), PEG-8 pčelinji vosak, oktokriken (6%), dietilaminohidrobenzoilheksil benzoat (3%), cink-oksidi (2,2 %), cink-ricinoleat, aluminijum-skrob-otkenilsukcinat, sukroza-tetrastearattriacetat, miris, tokoferilacetat, Shea buter (Butyrospermum parkii), hidrogenizovani stiren/ butadien kopolimer, mikrokristalni vosak, ulje nara, trietoksikapriliilsilan.

**LOT** Broj serije i rok upotrebe: videti kutiju i tubu.

Kada se tretman završi ukloniti tubu, uputstvo i kartonsku kutiju zajedno sa komunalnim otpadom. Uzмите u obzir životnu sredinu i reciklirajte.



Medicinsko sredstvo



Za jednog pacijenta, višekratna upotreba



Čuvati tubu zaštićenu od sunčeve svetlosti.



Čuvati van domašaja dece.



### Za više informacija posetite [www.sorefix.com](http://www.sorefix.com)

Ovlašćeni predstavnik i distributer u Republici Srbiji:

Salveo d.o.o. Beograd,  
Milutina Milankovića 3V, sprat 7, Beograd - Novi Beograd, R.Srbija  
Broj rešenja o registraciji: 003595240 2024 59010 009 000 515 059 04 003 od 27.02.2025.

Ovlašćeni predstavnik u Crnoj Gori:

Salveo CG d.o.o. Podgorica,  
Slovačka 117, Podgorica, Crna Gora  
Broj rešenja o registraciji: 2070/24/176-4456 od 22.02.2024.

Proizvođač

Serrix BV,  
Herengracht 45B,  
1017 CA Amsterdam,  
Holandija