





## Uputstvo za primenu tokom trudnoće i dojenja

U principu, Vagisan hidratantni krem se može koristiti tokom trudnoće. Međutim, pošto nema kliničkih podataka o primeni proizvoda u trudnoći, trudnicama se savetuje da se konsultuju sa svojim lekarom pre upotrebe Vagisan hidratantnog krema. Iz bezbednosnih razloga ne bi trebalo koristiti aplikator tokom trudnoće. Umesto toga čistim prstom uneti u vaginu traku krema dužine oko 2 cm.

Vagisan hidratantni krem se može koristiti tokom dojenja.

## Napomene za primenu pre seksualnog odnosa

Krem se može koristiti pre seksualnog odnosa kako bi se ublažili simptomi suvoće vagine. Otpornost na cepanje kondoma i kapica/dijafragmi može biti dovedena u pitanje pri istovremenoj upotrebi Vagisan hidratantnog krema.

Vagisan hidratantni krem ne sadrži nikakve spermicide (supstance koje ubijaju spermatozoide) i zbog toga ne štiti od neželjene trudnoće.

## Moguća neželjena dejstva

Blaga lokalna iritacija (svrab, peckanje) može se privremeno javiti, na primer, nakon prve primene krema. Ova iritacija može biti posledica suve i osetljive kože na intimnim delovima. U retkim slučajevima mogu se javiti jaka iritacija kože (npr. crvenilo, svrab, peckanje) i reakcije preosetljivosti koje mogu potrajati duže. Ukoliko takvi simptomi potraju i ne povuku se, trebalo bi da prestanete da koristite Vagisan hidratantni krem i da se obratite lekaru. Ukoliko primetite bilo koje druge neželjene događaje, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Od vas se traži da prijavite sve ozbiljne neželjene događaje proizvođaču i nadležnom organu u vašoj zemlji.

## Predoziranje

Ne očekuje se pojava štetnih efekata nakon prekoračenja doze navedene u uputstvu za upotrebu. Međutim, intravaginalna primena veće doze od one koja je preporučena u uputstvu za upotrebu može dovesti do povećanog vaginalnog iscedka komponenti krema.

## Interakcije sa drugim proizvodima

Ne očekuju se interakcije između Vagisan hidratantnog krema i drugih proizvoda koji se primenjuju isključivo van intimnog područja. Međutim, Vagisan hidratantni krem se ne sme koristiti istovremeno sa drugim proizvodima na istoj površini kože (npr. oba proizvoda u vagini u isto vreme). Između primene dva intravaginalna preparata treba ostaviti dovoljno dug vremenski period (npr. 24 sata).

## Ograničenja upotrebe

U slučaju ozbiljnijih simptoma izazvanih suvoćom vagine i u slučaju da Vagisan hidratantni krem ne ublažava simptome vulvovaginalne suvoće u dovoljnoj meri, treba potražiti savet lekara. Vagisan hidratantni krem se ne sme koristiti u slučajevima poznate preosetljivosti ili alergije na bilo koji od sastojaka. Krem se ne sme koristiti neposredno nakon porođaja. Nemojte koristiti Vagisan hidratantni krem ako imate vaginalnu infekciju (npr. kandidijazu); u ovom slučaju, trebalo bi da se obratite vašem lekaru.

## Dodatne napomene

Benzilalkohol može da izazove blagu lokalnu iritaciju. Cetearilalkohol može da izazove lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).

## Upozorenja u slučaju oštećenja proizvoda

Ukoliko su tuba ili aplikator oštećeni, ili ukoliko dođe do bilo kakvih promena u izgledu krema, nemojte koristiti proizvod i o tome obavestite proizvođača.

## Čuvanje i rok upotrebe

Vagisan hidratantni krem čuvajte van vidokruga i domašaja dece.

Čuvajte tubu dobro zatvorenu i skladištite na temperaturi do 25°C. Nemojte koristiti Vagisan hidratantni krem nakon isteka roka trajanja koji je odštampan na poklopcu pakovanja i/ili na pregibu tube.

Nakon prvog otvaranja rok upotrebe krema je 6 meseci.

## Odlaganje

Ako vam Vagisan hidratantni krem više nije potreban, ostatke krema kao i aplikator možete odložiti sa komunalnim otpadom.

## Veličine pakovanja

Tuba sa 50 g krema, spakovana u kartonsku kutiju. Pakovanje sadrži aplikator (sa CE znakom) za uvođenje krema u vaginu.

## Proizvođač

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel  
Sudbrackstrasse 56  
33611 Bielefeld  
NEMAČKA  
Telefon: +49 521 8808-05  
Faks: +49 521 8808-334  
E-pošta: [aw-info@drwolffgroup.com](mailto:aw-info@drwolffgroup.com)  
[www.vagisan.com](http://www.vagisan.com)

## Ovlašćeni predstavnik i distributer u RS

Salveo d.o.o. Beograd  
Milutina Milankovića 3V, sprat 7  
Beograd-Novi Beograd  
SRBIJA

## Broj rešenja o registraciji

000004010 2024 59010 009 000 515 059 04 003  
od 18.01.2024.

## Ovlašćeni predstavnik u CG

Salveo CG d.o.o. Podgorica  
Slovačka 117  
Podgorica  
CRNA GORA

## Broj rešenja o registraciji

2070/24/6 – 5686 od 05.01.2024.

## Medicinsko sredstvo

**CE 0483**

## Datum revizije teksta

Januar, 2024

DR·WOLFF

### Značenje simbola na spoljašnjem pakovanju i tubi:

Broj serije	Upotrebljivo do	CE znak	Pridržavajte se uputstva za upotrebu	Čuvati na temperaturi do 25°C	Medicinsko sredstvo