

VAXOL®

SPREJ ZA UHO

VAXOL® SPREJ ZA UHO sa maslinovim uljem

RS MNE

Vaxol® sprej za uho je jednostavno i delotvorno sredstvo za omekšavanje i prirodno uklanjanje ušnog voska čime se smanjuje potreba za ispiranjem uha ili se olakšava ispiranje ukoliko je ono neophodno.

Vaxol® sprej za uho ima jednostavan i jedinstven način primene kojim se unosi mala doza maslinovog ulja u spoljašnje uho, što olakšava korišćenje radi smanjene mogućnosti prekomerne primene i prelivanja. Klinički je dokazano da maslinovo ulje sprečava suvoću kože i na taj način smanjuje/ublažava svrab i iritiranost. Molimo Vas pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre korišćenja Vaxol® spreja za uho.

PRE KORIŠĆENJA NOVOG PAKOVANJA

- Pre korišćenja novog pakovanja Vaxol® spreja za uho, zagrejte bočicu dlanom, dobro je promućkajte a zatim pritisnite raspršivač 3 ili 4 puta dok ne počne raspršivanje (vidi sliku B). Pri tome nemojte usmeriti raspršivač prema sebi ili drugima. Ovim postupkom ćete pripremiti sprej za upotrebu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Vaxol® sprej za uho je najdelotvorniji ukoliko se zagreje dlanom i dobro promućka pre upotrebe.
- Primenite Vaxol® sprej za uho onako kako Vam je preporučio Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra.
- Koristite Vaxol® sprej za uho jednom nedeljno da bi sprečili prekomerno stvaranje ušnog voska.
- Deca od 1-12 godina primenjuju jednu aplikaciju Vaxol® spreja za uho, jednom dnevno tokom 4 do 5 dana. Ukoliko u tom periodu ne dođe do poboljšanja, obratite se lekaru za savet.
- Odrasli ili deca starija od 12 godina primenjuju 1 ili 2 aplikacije Vaxol® spreja za uho, dva puta dnevno tokom 4 do 5 dana. Ukoliko u tom periodu ne dođe do poboljšanja, obratite se lekaru za savet.
- Povucite ušnu školjku prema gore i unazad (vidi sliku A).
- Držite bočicu uspravno sa aplikatorom postavljenim u ušni kanal i stisnite do kraja raspršivač 1 ili 2 puta (vidi sliku B).
- Nežno masirajte ispupčenje na prednjem kraju ušne školjke (Tragus) (vidi sliku A).
- Ponovite postupak sa drugim uhom, ukoliko je potrebno.
- Raspršivač sa aplikatorom se nakon upotrebe može skinuti i isprati toplom vodom.

DODATNA OBAVEŠTENJA

- Pacijenti sa probušenom bubnom opnom ili bolnim uhom mogu koristiti ovaj proizvod samo uz nadzor lekara.
- Vaxol® sprej za uho ne smeju koristiti deca ispod 1 godine starosti bez konsultacija sa lekarom.
- Maslinovo ulje je prirodni proizvod i ima široku dnevnu primenu. Zato nema izveštaja o neželjenim reakcijama ili interakcijama sa drugim lekovima. Međutim, ovaj

proizvod ne bi trebalo koristiti ukoliko ste preosetljivi ili alergični na maslinovo ulje.

- Nisu zabeležene neželjene reakcije pri korišćenju ovog proizvoda tokom trudnoće i/ili dojenja, ali Vas molimo da se pre upotrebe posavetujete sa svojim lekarom.
- Nema neželjenih reakcija kod prekomernog ili premalog doziranja ovog proizvoda.
- U slučaju pojave alergijske reakcije, prestanite sa upotrebom ovog proizvoda i odmah o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

UPOZORENJA

- Jedno pakovanje Vaxol® spreja za uho može koristiti samo jedan pacijent.
- Uvek čuvajte Vaxol® sprej za uho u uspravnom položaju na temperaturi 15-25 °C.
- Nakon prvog otvaranja, medicinsko sredstvo se može upotrebljavati najduže 12 meseci.
- Sva neiskorišćena količina medicinskog sredstva se uništava u skladu sa važećim propisima.
- Ne koristite sprej blizu otvorenog plamena.
- Čuvajte van domašaja dece.
- Vaxol® sprej za uho primeniti samo u ušni kanal.
- Ne koristiti sprej blizu očiju, nosa ili usta.

Ovlašćeni predstavnik proizvođača i distributer za RS:

Salveo d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 3V, sprat 7,
Beograd - Novi Beograd, R.Srbija.
Broj rešenja: 515-02-04128-21-006 od 03.03.2022.


Ovlašćeni predstavnik proizvođača u MNE:

Salveo CG d.o.o. Podgorica, Slovačka 117, 81000 Podgorica,
Crna Gora
Broj rešenja: 2070/22/574 - 5040 od 13.06.2022.

Proizvođač:

HL Healthcare Ltd.,
The Courtyard, Eastern Road,
Bracknell, Berkshire,
RG12 2XB, Ujedinjeno Kraljevstvo

Zaštićeni patent

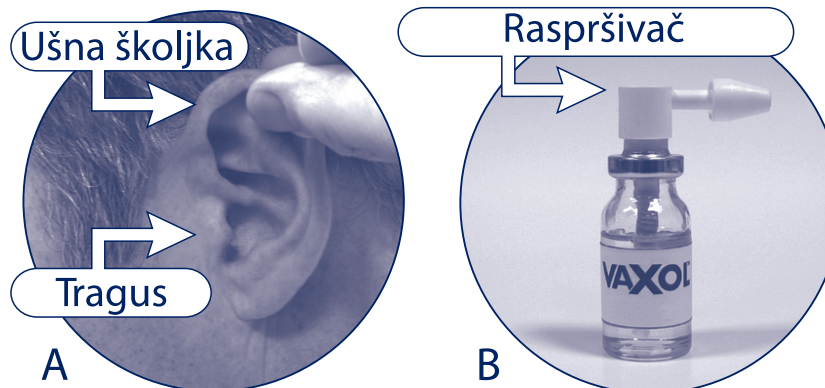

V111-15 0VNL2FIE0018

10ml

VAXOL®
LTD

